

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

ANDADOR ROLLATOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Estructura tubular de aluminio de alta resistencia.
- Pernos para Allen
- Anodizado en color burdeo
- Barra horizontal anterior y posterior.
- Plegable.
- 4 ruedas con eje fijo macizas de 8 pulgadas.
- Asiento abatible acolchado con goma de alta densidad.
- Sistema de frenos con piola.
- Ruedas delanteras multidireccionales y posteriores unidireccionales.
- Empuñadora ergonómica de goma suave de alta densidad, antideslizante
- Control de frenos de ruedas traseras desde empuñaduras.
- Respaldo de goma de alta densidad.
- Canasta metálica desmontable para llevar objetos bajo del asiento.
- Resiste fuerza máxima de 100 a 110 kg. de peso.
- Incluye set de herramientas.
- Manual en español

				
71 cm	65 cm	81 -93 cm	17 cm	110 kilos



Imagen Referencial

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

PARTE ARMADO:

Para poder leer y entender este manual, es importante que se familiarice con los términos mas comunes que empleamos para las distintas piezas del andador de paseo.

Producto contiene:

- Puños.
- Palanca de freno.
- Asiento.
- Cesta.
- Cable de freno.
- Estructura lateral
- Bisagras
- Barra
- Sujeción ara ajustar la altura
- Correa para plegar el andador
- Zapata de freno con deflector lateral
- Mago de elevación y soporte de la cesta.

Cuando reciba su andador de paseo, usted debe:

- Desplegar el andador de paseo.
- Situé los puños a la altura correcta.
- Coloque y ajuste los accesorios.
- Empuje la palanca de freno hacia abajo para activar el freno de parada.
- Oirá un ligero clic cuando el freno en parada este activo.
- Antes de sentarse, asegúrese de que el freno en parada este activo.

INSTRUCCIONES DE USO:

- Coloque el pie en la barra para subir las ruedas delanteras del andador cuando necesite sortear bordes, umbrales u otro obstáculo.
- El andador 4 ruedas esta equipado con un deflector lateral, que evita que la rueda trasera se estanque con obstáculos protuberantes como marco de puertas y esquinas.
- El andador se bloquea automáticamente en la posición del plegado total. Tire de la correa para plegar el andador.
- Luego presione hacia abajo las barras laterales hasta que oiga un pequeño clic que indica la posición de despliegue total.
- Antes de usar el andador, asegúrese de que el mecanismo de plegado se encuentre fijo en su posición.
- Para levantar y transportar sugerimos que pliegue el andador antes, pues es la forma mejor y mas sencilla de hacerlo por la relación entre peso y mangos de elevación.