

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

BOTA DE DESCARGA CORTA PARA ULCERAS PLANTARES

COMPOSICIÓN:

- Estructura 100% Nylon.
- Planta 100% Polipropileno.
- Plantilla 100% Goma Eva.
- Cierre contacto 100% Nylon.
- Hexágonos removibles (4 capas)
- 3.5 mm de Goma Eva de alta densidad 30 a 35 gris
- 3 mm de espuma de Poliuretano densidad 45 a 50 negro
- 7 mm espuma de Poliuretano densidad 20 blanco
- Velour con cierre de contacto negro
- Tallas: S-M-L-XL
- Color: Plata
- Envasado: Bolsa tela no tejida: 29cmx16cmx 30cm.



Imagen Referencial

DESCRIPCIÓN:

- Bota de descarga para uso en pacientes con úlceras plantares.
- Con plantilla lego la que permite retirar los hexágonos una vez marcados en la zona de la herida con el propósito de generar una descarga del peso localizada.
- Plantilla de reemplazo disponible.

INDICACIÓN:

- Permite la curación de úlceras plantares reduciendo la carga e inmovilizando el pie.

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

BOTA DE DESCARGA CORTA PARA ULCERAS PLANTARES

COMO USAR:

1. Remueva la plantilla que se encuentra al interior de la bota de descarga.
2. Proceda a marcar el contorno de la úlcera con el lápiz marcador.
3. Coloque el pie del paciente sobre la plantilla para imprimir la localización de la úlcera.
4. Remueva la plantilla y retire todos los hexágonos marcados.
5. Reinserte la plantilla en el interior de la bota de descarga.
6. Coloque el pie del paciente al interior de la bota y proceda a ajustar los velcros.

MANTENCIÓN:

Lavar la estructura con un paño húmedo y detergente suave.

Lavar a mano hasta 30°C de temperatura.

Lavar con cierres de contacto adheridos para evitar la acumulación de pelusas.

CERTIFICACIÓN:

Certificación de norma ISO-9001/2015 Sección 8.2.3 N°CL13/20100668

CÓMO ELEGIR:

TALLA	Small	Medium	Large	XLarge
Largo	23 cm	27 cm	28.5 cm	31 cm
Calzado	38-39	39-42	43-44	45-46
Código	7801001011018	7801001011025	7801001011032	7801001011131